


25-07-2025 08:00:10 FRI

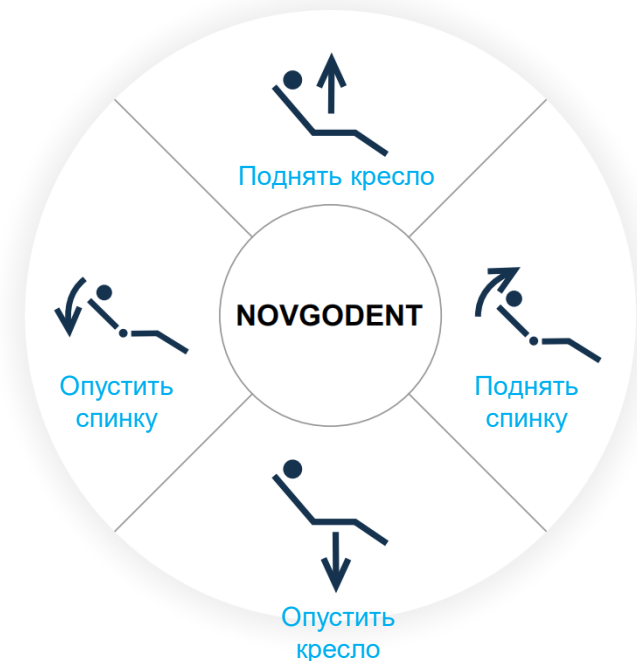

Подогрев воды



Положение для полоскания



Пантограф



Таймер



Подачи воды в плавательницу



Позиция первой помощи



Бестеневая лампа



Переключение источника воды



Наполнение стакана



Начальная позиция



Подогрев воды в наконечнике



Защита от детей
Аварийная остановка



Кнопка врача



Позиция в памяти 1



Позиция в памяти 2



Позиция в памяти 3



Кнопка дезинфекции



Выбор режима дезинфекции



Вход в режим настроек
(Длительное нажатие более 3 сек)

25-07-2025 08:00:10 FRI

Системные настройки



Общие настройки



Подача воды в
стакан/
плевательницу



Выбор
источника воды



Настройки
подкатного блока



Настройки памяти



Настройки
ограничений



Нагрев
наконечника
вкл/выкл



Защитная
блокировка от
детей вкл/выкл



Настройки
дезинфекции



Дата/время



Микромотор
вкл/выкл



Скейлер
вкл/выкл

Настройки положения
инструмента

1 2 3 4 5 6

A



B

Настраиваемые
многофункциональные
кнопки A и B на педали




1 2 3 4 5 6

Нажмите, чтобы
выбрать режим с
одним или двумя
двигателями



Кнопка назад
Нажмите быстро 2 раза для
возврата на начальный экран

Удерживайте 3 сек.
для входа в меню
настроек

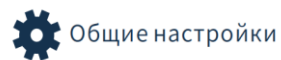

25-07-2025 08:00:10 FRI

Общие настройки

Выключатель
звукового сигнала



Вкл.\Выкл.

Яркость



Регулировка яркости

Язык



English

Русский

Назад



Удерживайте 3 сек.
Для входа в настройки
подачи воды



Подача воды в
стакан/
плевательницу



25-07-2025 08:00:10 FRI

Подача воды в стакан/плевательницу

Время наполнения

Отображение времени
наполнения стакана

стакана
Секунды:

5s

Длительное нажатие
для установки
времени подачи воды.

Длительное
нажатие

(Удерживайте кнопку нажатой, пока вода в бумажном стакане не достигнет подходящего уровня, это автоматически записывается)

Время ополаскивания чаши

3 мин

5 мин

15 с


В обычном
состоянии
открыто

Установка времени
ополаскивания чаши



Назад


Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сохранения положения.

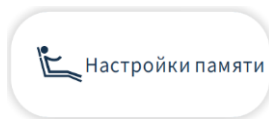

После входа в интерфейс настройки памяти положения:

1. Выберите положение врача, которое необходимо установить
2. Отрегулируйте требуемую высоту сиденья и спинки
3. Выберите положение для лечения, которое необходимо сохранить в текущей позиции

25-07-2025 08:00:10 FRI

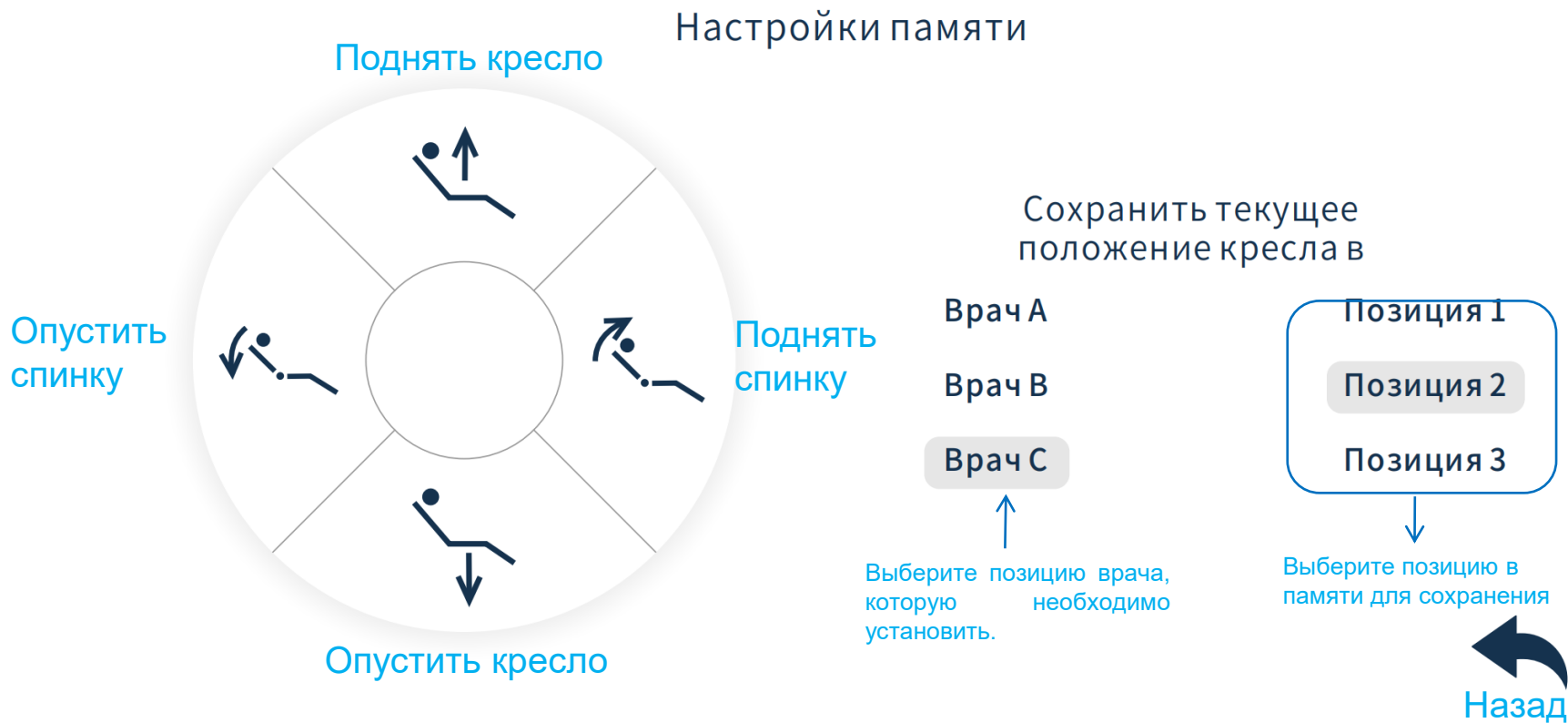

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти к настройке предельного положения




Настройки ограничений

Нажмите «Автоконфигурация»:

1. Положение кресла автоматически переместится в самое нижнее и самое верхнее положения, и все предыдущие настройки будут сброшены до заводских.
2. После завершения настройки интерфейс автоматически закроется.

25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройки ограничений

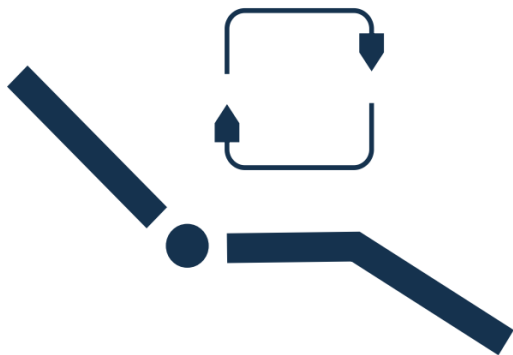

Нажмите кнопку "Auto Setup", устройство автоматически выполнит настройку.

Нажмите, чтобы начать инициализацию.

Автоконфигурация



Назад

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы установить дату.



Дата/время



После входа в интерфейс настройки даты/времени вы можете прокручивать пальцем вверх или вниз, чтобы установить время или дату. После завершения настройки нажмите клавишу Назад, чтобы завершить настройку.

25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройка даты/времени


2021	1	13
2022	2	14
2023 год	3 месяц	15 день
2024	4	16
2025	5	17

1	1	13
2	2	14
3 ч	3 мин	15 с
4	4	16
5	5	17



Назад

Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы перейти к настройке дезинфекции

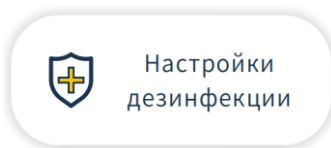


Режим дезинфекции установлен на заводе, повторная настройка не требуется. Выберите режим дезинфекции в соответствии с конфигурацией стоматологического кресла:



25-07-2025 08:00:10 FRI

Настройки дезинфекции

Нажмите, чтобы выбрать режим дезинфекции.

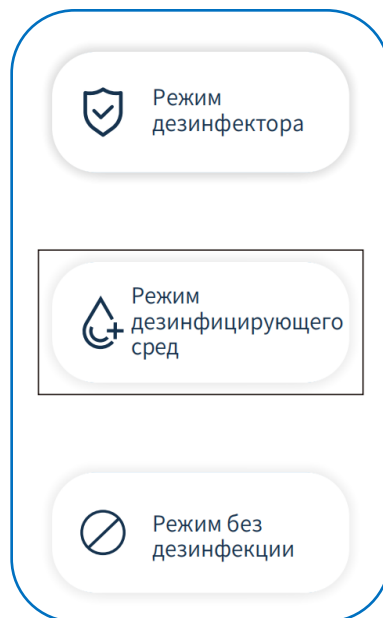

1. Режим дезинфекции озоном: поддерживается только при наличии в стоматологическом кресле дезинфицирующего устройства.

2. Режим дезинфекции (стандартный): для дезинфекции используйте хлорноватистую кислоту

3. Режим без дезинфекции: после выбора на экране не отображается кнопка дезинфекции



Назад



Шаг 1: Подготовка к дезинфекции:

1. Наполните флаконы (см. маркировку рядом с флаконами) **ЧИСТОЙ ВОДОЙ** и **ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ** в соотношении 1:8 (1 часть дезинфицирующего средства на 8 частей чистой воды).
2. На столе врача снимите насадку со шприца, наконечник и ручку скейлера.
3. На столе ассистента снимите насадку со шприца, пылесос и слюноотсос.
4. Поместите дезинфицирующую пластину на плевательницу так, чтобы распылительная насадка находилась под струей воды для полоскания рта.
5. Вставьте следующие инструменты в места крепления:
 - Вставьте шприц в места с зажимами и зафиксируйте их.
 - Откройте клапан для пылесоса и слюноотсоса в местах рядом с лейкой
 - Установите стальные разъемы для турбин и скейлера в оставшиеся места.
6. Откройте регуляторы потока воды на максимум (они расположены с правой стороны стоматологического стола).

25-07-2025 08:00:10 FRI



Нажмите, чтобы
запустить
дезинфекцию



Шаг 2: Войдите в режим ожидания дезинфекции:

1. Выберите режим дезинфекции A или B
2. Нажмите кнопку дезинфекции, чтобы войти в интерфейс дезинфекции с помощью одной кнопки.

Автоматическая дезинфекция с помощью режима одной кнопки для M8

Процесс	Режим дезинфекции	Процедура дезинфекции
<p>1. В комплекте 2 бутылки по 3 л:</p> <p>① одна для дезинфицирующей воды, используемой в процессе дезинфекции</p> <p>② вторая для чистой воды, используемой для инструментального лотка, лотка ассистента и полоскания</p> <p>2. Можно записывать общее количество операций дезинфекции и экспортировать отчет на SD-карту.</p> <p>3. После дезинфекции стоматологическое кресло переходит в режим ожидания. Если в течение 1 часа не выполняется никаких операций, переключатели воды, воздуха и электричества автоматически отключаются.</p>	<p>Режим А: 8+1 минута (обычная дезинфекция)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Промывка трубок чистой водой — 1 мин. 2. Промывка трубок дезинфицирующим средством — 2 мин. 3. Дезинфекция спец. средством в трубках — 3 мин. 3. Повторная промывка трубок чистой водой — 1 мин + 30 с. 4. Сушка трубок воздухом — 1 мин + 30 с.
	<p>Режим В 21+1 минута (глубокая дезинфекция)</p>	<p>Нажмите и удерживайте кнопку дезинфекции в течение 3 секунд, чтобы войти в режим В.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Промывка трубок чистой водой — 1 мин. 2. Промывка трубок дезинфицирующим средством — 2 мин. 3. Дезинфекция спец. средством в трубках — 15 мин. 3. Повторная промывка трубок чистой водой — 2 мин + 30 с. 4. Сушка трубок воздухом — 1 мин + 30 с.




25-07-2025 08:00:10 FRI



Общее время: мин
Осталось: :
Дата последней дезинфекции: - -



25-07-2025 08:00:10 FRI

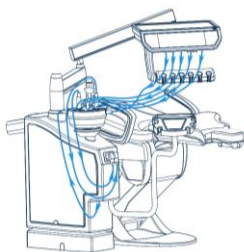

Опорожнение труб

Общее время: 1 мин
Осталось: с

По завершении дезинфекции водопроводная система установки автоматически высушивается для предотвращения роста бактерий.



Процесс сушки воздухом для удаления остатков воды из труб.

Шаг 3: Начало дезинфекции:

1. Нажмите круглую кнопку на сенсорном экране с надписью «Нажмите для начала дезинфекции».
2. После автоматического завершения дезинфекции извлеките все трубки из держателя и установите их на свои места на столе.
3. Благодаря защитной конструкции бойлера в гидроблоке, после процесса сушки воздухом в резервуаре останется небольшое количество дезинфицирующего средства.

Рекомендуем промыть двумя стаканами ополаскивателя для рта, чтобы разбавить оставшееся дезинфицирующее средство в нагревателе чашек.

переключатель источника воды



2 PM on Monday, February 13th, 2023.

переключатель источника воды






Бутылка для чистой воды








Бутылка для дезинфицирующего средства

— Режим чистой водой:

1. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните соответствующую бутылку чистой водой.
2. Добавив воды, нажмите  , чтобы перейти в режим работы с чистой водой.
3. нажмите  , чтобы переключиться в режим водопроводной воды.

Режим дезинфекции:

1. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните соответствующую бутылку чистой водой.
2. Добавив воды, нажмите  , чтобы войти в режим дезинфекции.
3. Когда бутылка с чистой водой  пуста и подается сигнал тревоги, немедленно наполните бутылку с водой дезинфицирующим средством.
4. Добавив воды, нажмите  , чтобы войти в режим дезинфекции.
5. нажмите  , чтобы выйти из дезинфекции.

При поднятии рукоятки на экране отображается следующее:



25-07-2025 08:00:10 FRI


Динамическое оборудование - наконечник 1

Высокоскоростной турбинный наконечник



Давление воздуха в
наконечнике, кПа
кПа

Индикатор рабочего
давления наконечника

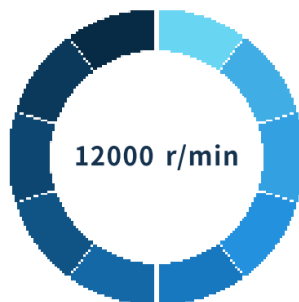

Скорость наконечника

Индикатор скорости
наконечника

Позиция инструмента

1

2

3

4

5

6




Кнопки лечения

При поднятии скейлера на экране отображается следующее:



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Зубной скейлер

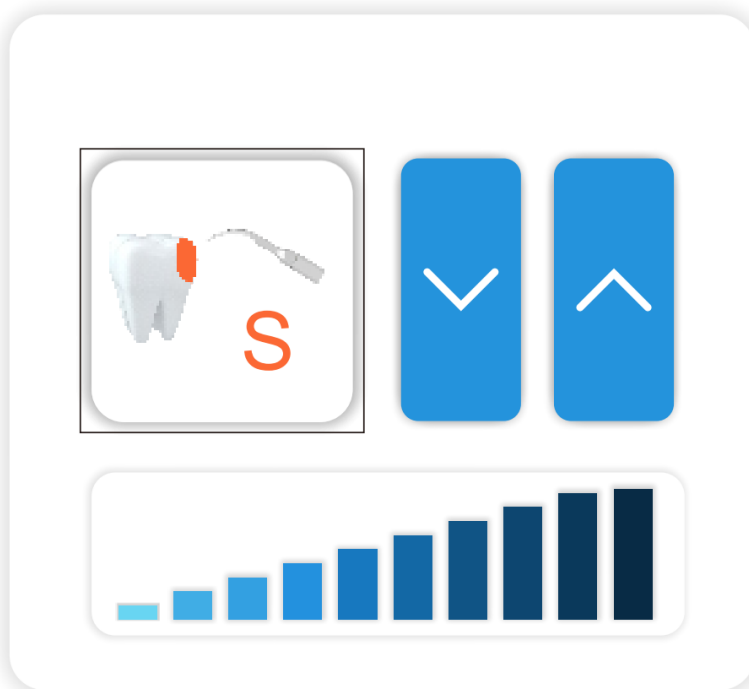

Индикатор мощности скейлера



Кнопки лечения






Выбор режима скейлера



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Зубной скейлер

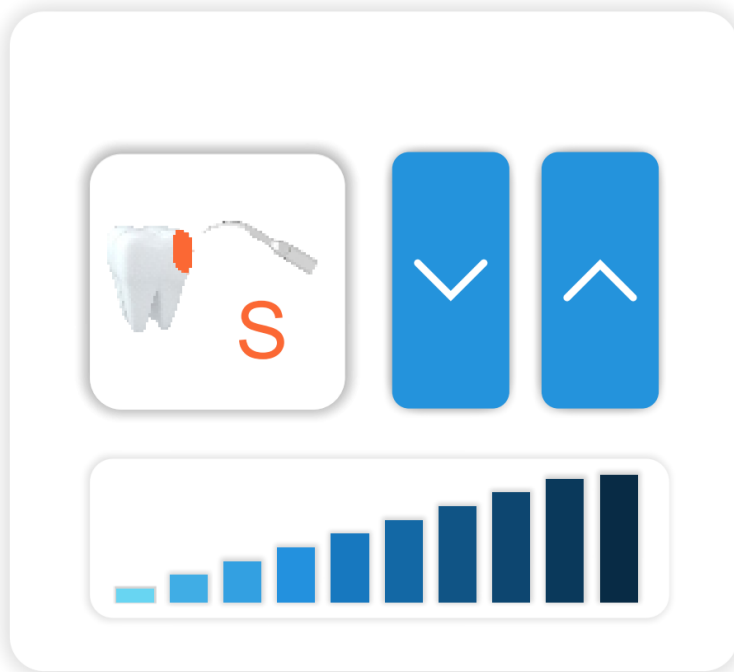

Позиция инструмента 5

I

II

III



Когда вы поднимаете наконечник с микромотор, на экране отображается



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Электромоторы

Электромоторы Выбор режима работы электродвигателя

M1 M2 M3 M4

Снижение оборотов  200000 RPM  Увеличение оборотов

Выбор передаточного соотношения  1:1  1:5  16:1  20:1

Реверс  Вперед  Свет 

Реверс Вперед Свет Вкл\Выкл

Индикатор скорости электродвигателя

Позиция инструмента 4

Увеличение оборотов



Кнопки лечения





Выбор марки микрометра



25-07-2025 08:00:10 FRI

Динамические инструменты - Электромоторы

Электромоторы

M1

M2

M3



200000 RPM



1:1



1:5



16:1



20:1



Реверс



Вперед



Свет

Позиция инструмента 6

DS

BA

JM

SH

DT

